

HERMES

Carros cerrados de aluminio
para el transporte



EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN EL
INTERIOR Y ENTRE LOS DISTINTOS EDIFICIOS DEL HOSPITAL

TRANSPORTE SEGURO

Carros de aluminio rígidos de alta resistencia para el transporte de equipamiento estéril y no estéril entre las áreas del hospital o entre la central de esterilización y los departamentos médicos



Protectores superiores para el transporte dentro de los camiones




Protectores inferiores
"todo al rededor"



Estructura de enganche específica para un remolque seguro



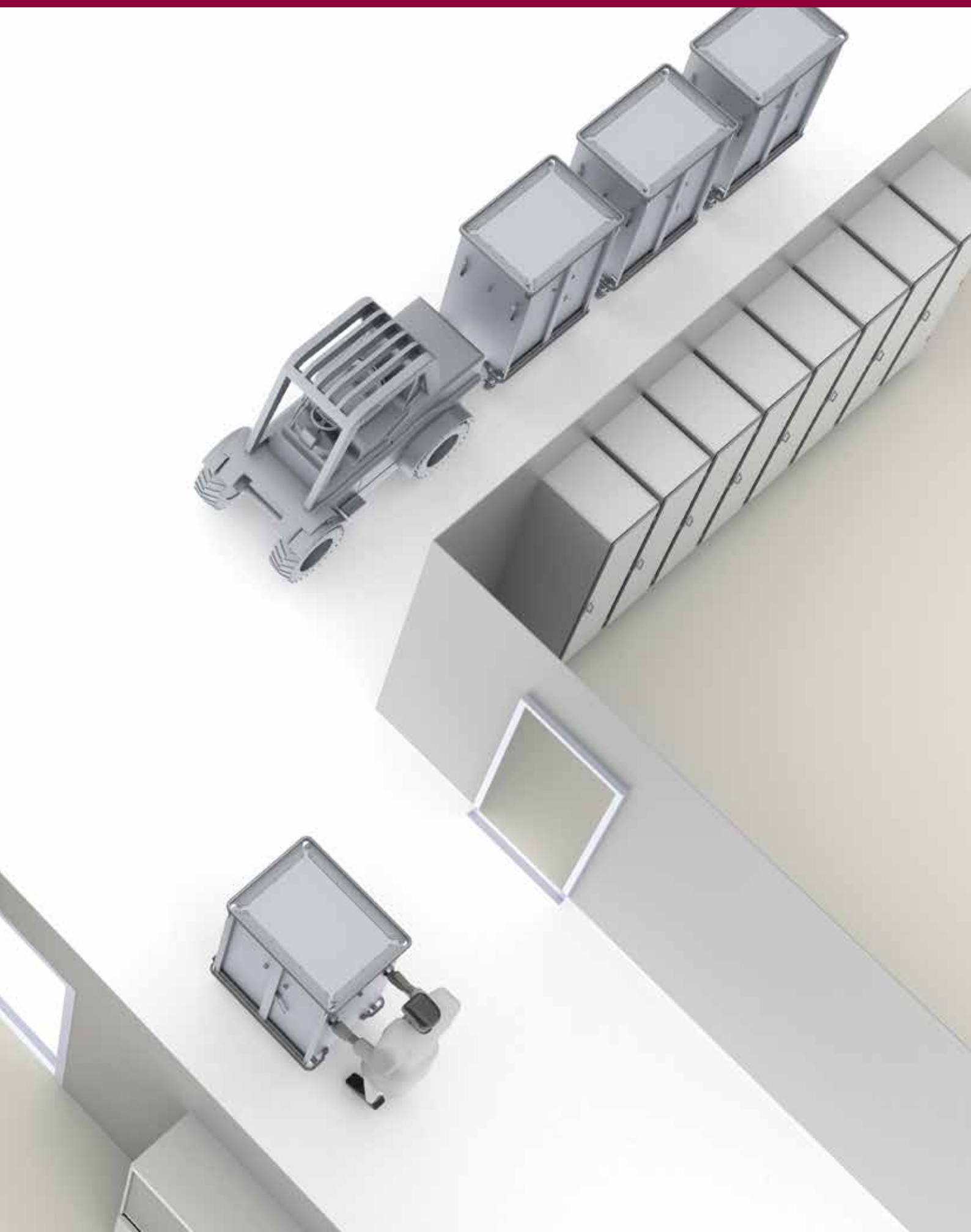

CARACTERISTICAS UNICAS

COMBINACION DE ESTRUCTURA RIGIDA Y PESO LIGERO CON RESISTENCIA PARA EL LAVADO Y LIMPIEZA

ASAS ERGONOMICAS

Asas ergonómicas, horizontales y verticales

CERRADURAS

Las puertas pueden ser cerradas con llave o con precintos

270° DE APERTURA DE LAS PUERTAS

Las puertas se abren hasta 270°, y se bloquean con un imán en las paredes exteriores del carro

RUEDAS PARA PESOS PESADOS

6" Ruedas para pesos pesados con o sin freno





PROTECTORES

de goma en la parte superior e inferior alrededor del carro

BANDEJAS INCLINADAS

Las bandejas y cestas se pueden inclinar mientras se sacan

PANELES

Los paneles laterales están hechos de nylon duraderos, lavables y extraíble (ver página siguiente)

REMOLQUE

Conexión opcional para un remolque seguro

LAVADO Y LIMPIEZA

LOS PANELES SE PUEDEN REMOVER FACILMENTE PARA EL LAVADO

Los paneles laterales y centrales se pueden remover fácilmente para el lavado usando conectores rápidos (no son necesarias herramientas)



Suelte las perillas de bloqueo (sin herramientas)



Saque la pared del medio (pared ligera)



Suelte las perillas y saque las paredes laterales



listo para lavar (lavar a máquina)

PANEL LATERAL DE NYLON

LOS PANELES LATERALES DE NYLON SON RESISTENTES AL CALOR HASTA 110°C (230°F) GRADOS



PNL(U)-NWN

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- Los carros están contruidos de una aleación ligera anodizada y adecuados para el lavado y desinfección química
- ¡No se recomienda Desinfección Térmica!
- Considerando el significativo número de diferentes tipos de productos de limpieza en el Mercado, sugerimos consultar primero con Pegasus





CARRO INDIVIDUAL U
HAL-4.0U-PNL



CARRO DOBLE UU
HAL-3.0UU-PNL


UNA AMPLIA SELECCION DE MODULOS DE ALMACENAMIENTO PARA USOS VARIOS

MODULOS DE ABS




Bandeja 10cm (4") altura

MODULOS PARA MATERIAL ESTERIL

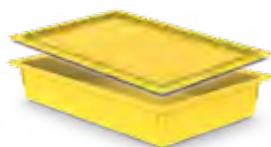

Bandeja 10cm (4") altura

MODULOS ISO ANTIMICROBIANOS

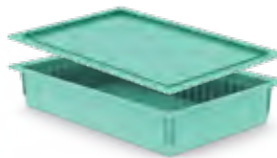

Bandeja 10cm (4") altura

MODULOS DE POLICARBONATO



Bandeja 10cm (4") altura

MODULOS DE ACERO INOXIDABLE


Modulos aptos para esterilizacion



Cesta 10cm (4") altura



Cesta 20cm (8") altura

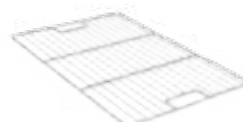

Plana 60X40cm (24"X16")



Plana 30X40cm (12"X16")



CONTACTENOS PARA MAS INFORMACION

+1 888-276-4750 | info@pegasusmedical.net | www.pegasusmedical.net

USA / CANADA
905 E. Rose St Lakeland
FL 33801 - USA

EUROPA / MEDIO ORIENTE / ASIA
Damzigt 13, 3454 PS De Meern
The Netherlands